

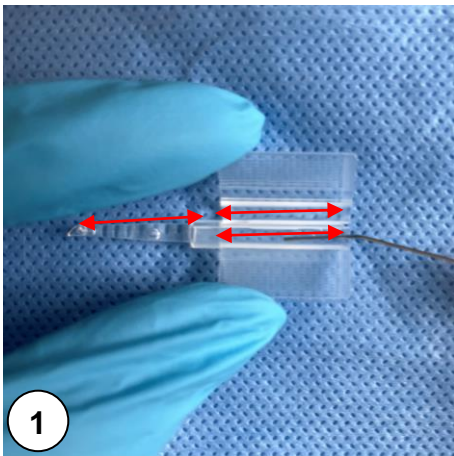
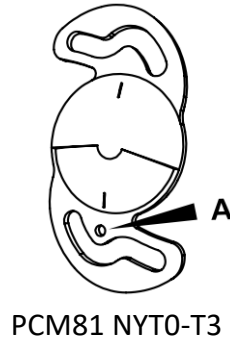


# Einlegehinweise – Viscoject Bio

## Multifokale VISIOTIS® Progress

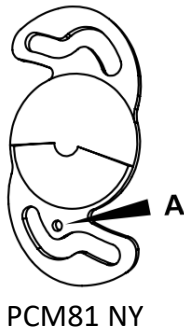


Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.

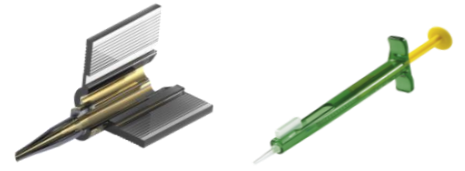


IOL-Blister vom Körper weg öffnen.




IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten. **Jederzeit waagrecht halten!**

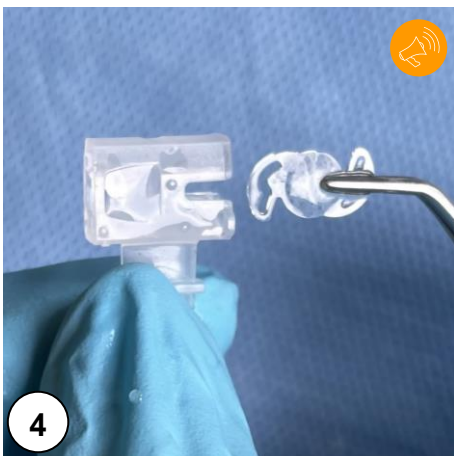



**Einkerbung muss rechts sein!**  
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen  
**Keine verzahnte Pinzette benutzen!**

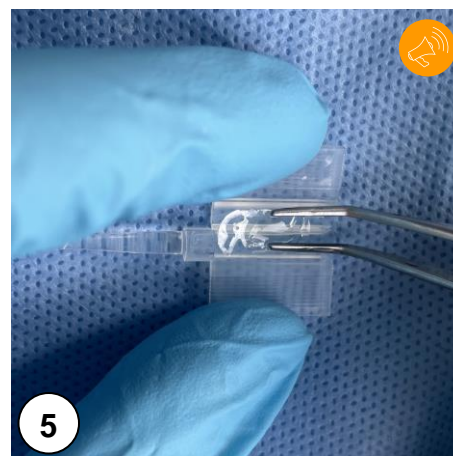

IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Lage der Markierung A achten**. IOL mit **Pinzette nach unten drücken** und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

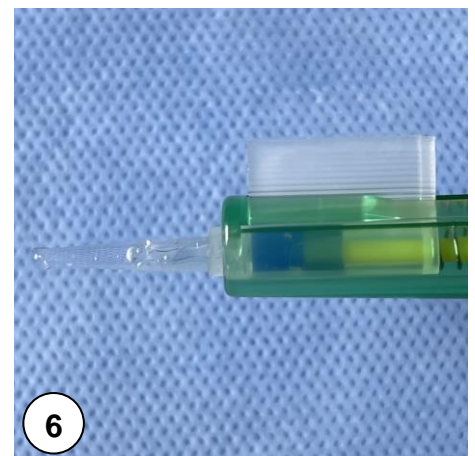

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

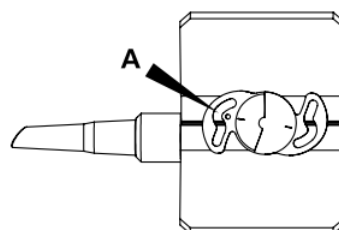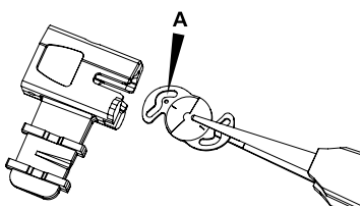

Bitte diese Schritte besonders beachten!