




# Einlegehinweise - Accuject Back-loaded Monofokale VISIOTIS®

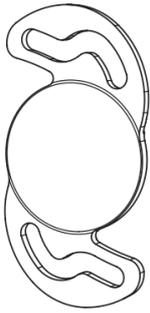


PCA81  
PCX81  
PCX81 NY

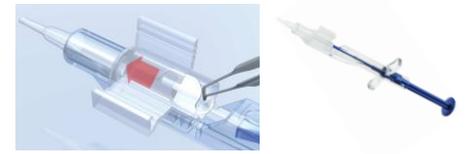

PCX81 NYT0-T6

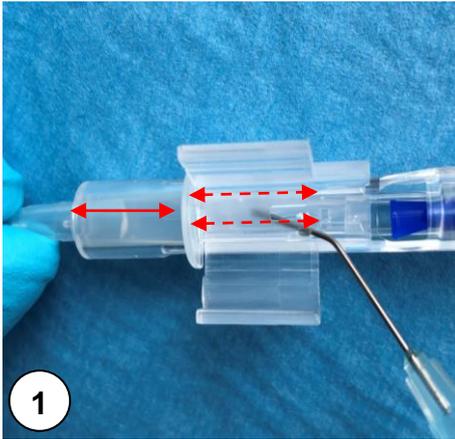

Kartuschenspitze und Ladekammer **unterhalb** der Abdeckung mit Viskoelastikum befüllen.

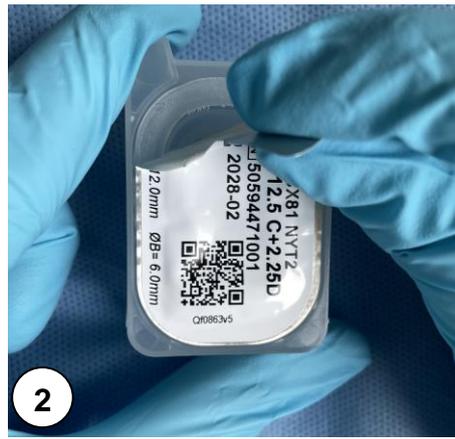


IOL-Blister **vom Körper weg** öffnen.




IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten. **Jederzeit waagrecht halten!**




**Einkerbung muss rechts sein!**  
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen  
**Keine verzahnte Pinzette benutzen!**

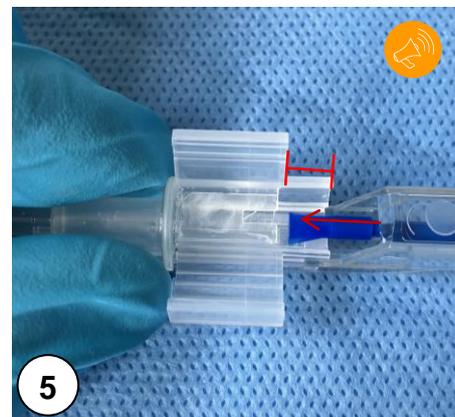

IOL unter der Abdeckung platzieren. **Blauen Stempel in den rot markierten Bereich vorschieben, dann Kartusche schließen!**

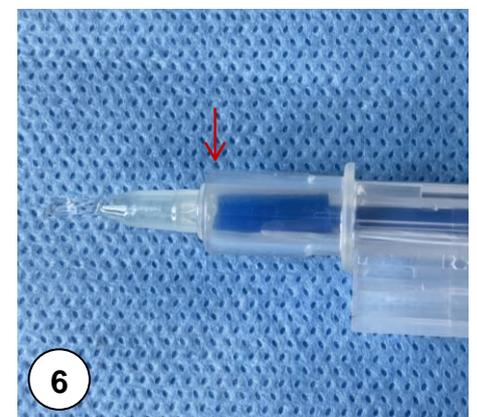

Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, Kolben kurz entlasten und IOL implantieren.

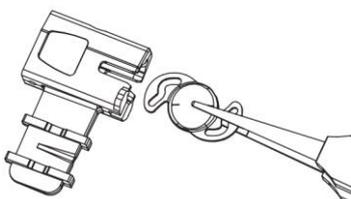

Bitte diese Schritte besonders beachten!